

CASIBA 2104 EQE

Equipo portátil para presión negativa en salas de aislamiento.

- Fácil y rápida instalación
- Tres etapas de filtración.
- Salida horizontal o vertical mediante conducto flexible.
- Apto para colgar o apoyar sobre ménsulas o mesada.



Características generales

El propósito de los equipos **CASIBA 2104-EQE** es generar en forma rápida y con muy fácil instalación, una sala de aislamiento con presión negativa para evitar que los contaminantes salgan del área y se propaguen. Esto se logra ubicando el equipo en el interior, ya sea apoyado sobre ménsulas, mesada, o colgado del techo y vinculando su salida al exterior mediante un conducto flexible.


También se pueden utilizar como equipos recirculadores para disminuir la contaminación ambiental. Para esta aplicación, es necesario solamente no vincular su salida al exterior.

Características constructivas

Se fabrica en dos modelos, aptos para 600 y 1200 m³/h de caudal de aire nominal. Totalmente fabricado en chapa de acero inoxidable AISI, posee manijas laterales para su traslado, tecla de encendido del ventilador con variador electrónico de velocidad y tecla de encendido individual para la luz germicida UV-C.

Con ventilador centrífugo monofásico, apto para 220 v, 50 Hz., con variador de velocidad para ajuste del caudal, se compone con tres etapas de filtración: un filtro de mediana eficiencia impregnado con carbón activado **CASIBA 308 CA**, una luz germicida ultravioleta (UV-C) de alta intensidad y un Filtro ABSOLUTO® HEPA **CASIBA 508 MP**.

Equipado con grilla de protección de acero inoxidable, perforada sobre la cara de ingreso y con collarete circular sobre la cara de salida, para el acople de conducto flexible.

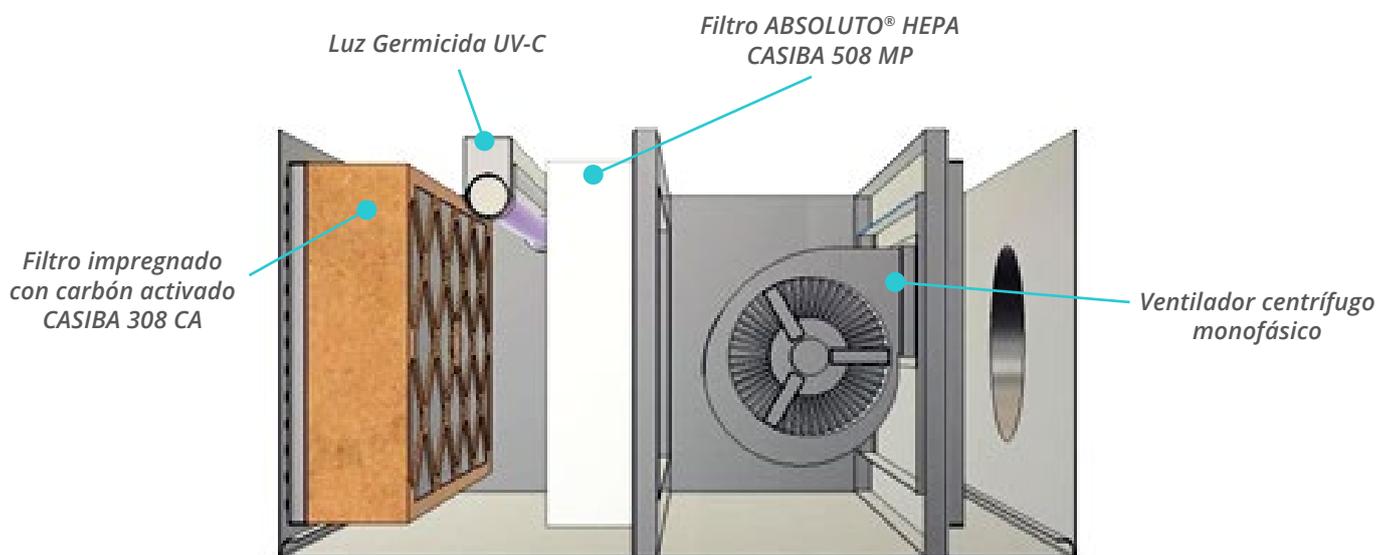

Aplicaciones frecuentes

Hospitales existentes o nuevos, en ambientes o salas de aislamiento destinadas a alojar pacientes infectocontagiosos.

Cuadro de dimensiones

MODELO	DIMENSIONES (mm)			POTENCIA (HP)	CAUDAL NOMINAL (m ³ /h)	COLLARETE DE SALIDA (mm)	PESO (Kg)
	ANCHO	ALTO	LARGO				
2412	600	335	645	0,25	600	200	31
2424	660	660	875	0,50	1200	250	68


Condiciones de almacenamiento

Se recomienda no almacenar directamente bajo los rayos solares. Almacenar con las protecciones originales, evitando golpes en sus bordes laterales y superiores.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos, en todos los procesos, las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

No lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

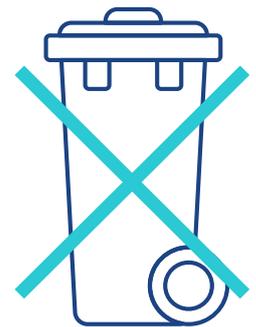

*Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia.
Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.*

REV. Diciembre 2023

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

 (+5411) 4750.0051

 comercial@casiba.ar

 casiba.ar

 @casiba

 @casiba.sa

 /company/casiba-s-a-

